

easyfill | knee

Facilitando o tratamento da fratura por insuficiência

/// Substituto Ósseo em Pasta de Fosfato de Cálcio /// Cânula Descartável para Subcondroplastia de Joelho

SUBCONDROPLASTIA DE JOELHO

PROCEDIMENTO

Cirurgia Minimamente Invasiva, percutânea e guiada por radioscopia que tem como objetivo o preenchimento com substituto ósseo em pasta da fratura por insuficiência.

INDICAÇÕES

- /// Lesão óssea observada em ressonância magnética
- /// Dor nas articulações por mais de 3 meses
- /// Desconforto ao andar, correr ou em pé, pouco ou nenhum alívio com uso de tratamento conservador
- /// Pouco benefício com a realização da artroscopia

BENEFÍCIOS

- /// Alívio da dor imediata
- /// Melhora da qualidade de vida
- /// Melhora da mobilidade
- /// Procedimento MMI, menos riscos para paciente



VISÃO GERAL DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO

O diagnóstico da fratura de insuficiência é feito via Ressonância Magnética, onde o cirurgião nota uma parte branca próxima à região da cortical – sendo possível observar o defeito ósseo subcondral. O paciente abaixo pode ser um candidato para realizar a Subcondroplastia de Joelho.



Easyfill é composto pelo Substituto Ósseo em Pasta Injetável e Reabsorvível de Fosfato de Cálcio – Graftys® HBS® e Cânula Descartável para Subcondroplastia de Joelho®.

O Substituto Ósseo, Graftys® HBS®, é uma pasta que tem facilidade para fluir e preencher o defeito subcondral e possui propriedades porosas que garantem a melhor relação entre reabsorção e crescimento ósseo quando injetado. A inserção deste substituto ósseo é realizado através das cânulas desenvolvidas especialmente para o procedimento. Estas cânulas possuem abertura lateral que permitem o cirurgião preencher exatamente a área em que precisa ser tratada.



Substituto Ósseo em Pasta Injetável e Reabsorvível de Fosfato de Cálcio

- /// Biocompatível
- /// Resistência Mecânica
- /// Prepararo Rápido e Fácil
- /// Isotérmico
- /// Osteoindutor e Osteocondutor
- /// Porosidade
- /// Apresentação - 8CC
- /// ANVISA 80517190001



Cânula Descartável para Subcondroplastia do Joelho

- /// 3-Hole System- Sistema de saída lateral
- /// Marcação Externa - Exclusivo
- /// Marcação gradual na Cânula para auxílio de inserção
- /// Cânulas em dois tamanhos conforme paciente a ser operado
- /// Produto de uso único, descartável
- /// ANVISA 10243070056

